


Rectal Swab


سواب مقعد

قبل از شروع:

- تمام دستورالعمل ها را بخوانید.
- اگر بیش از یک نمونه را جمع آوری می کنید، از لوله صحیح برای هر قسمت از بدن (با برچسب های گلو، مقعد یا واژینال) استفاده کنید.
- اگر مایع داخل لوله بیرون ریخت، باید از اول شروع کنید و یک لوله یا کیت جدید درخواست کنید.

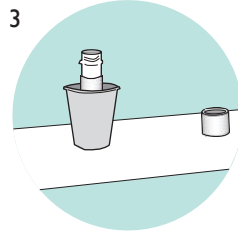

درپوش را در حالیکه سطح داخلی آن رو به بالا باشد، پایین بگذارید. لوله را به صورت عمودی روی سطح صاف قرار دهید.

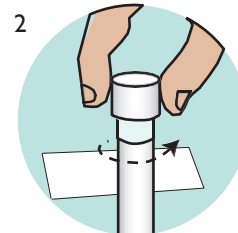


یک عدد دستمال کاغذی را روی یک سطح تمیز و صاف قرار دهید.




دست ها را با آب و صابون بشویید.

در صورت تمایل می توانید از یک فنجان برای ثابت نگه داشتن لوله استفاده کنید.


درپوش لوله را با چرخاندن از لوله درآورید.

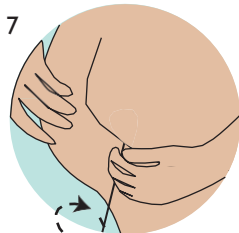


سواب را حدود 4 سانتی متر به داخل ببرید.

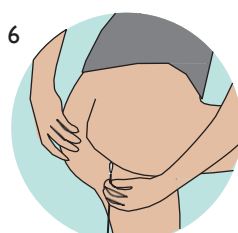

با یک دست یک طرف باسن را بگیرید و آن را باز کنید. با دست دیگر، سواب را در دهانه مقعد قرار دهید.

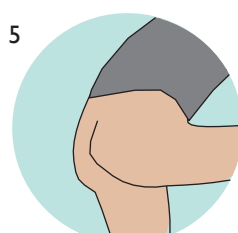


در موقعیتی قرار بگیرید که به راحتی به مقعد خود دسترسی داشته باشید.

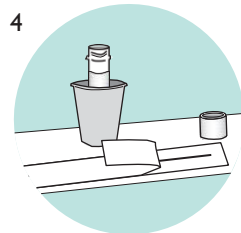

سواب را از داخل بسته بندی بیرون بیاورید. نوک نرم سواب با دست شما یا سطوح دیگر تماسی پیدا نکند.


سواب را به آرامی 2 یا 3 بار دایره ای بچرخانید، بطوریکه با دیواره ی مقعد تماس پیدا کند.

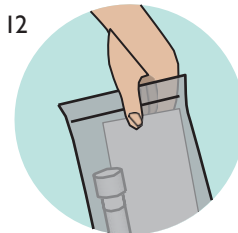


کیسه را به ارائه دهنده خدمات درمانی برگردانید.



دست خود را با آب و صابون بشویید.

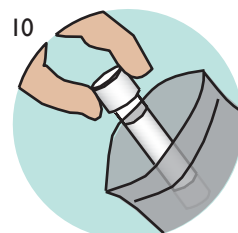

لوله را در کیسه پلاستیکی خطر زیستی قرار دهید.

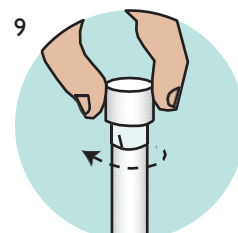

درپوش را روی لوله بگذارید و آن را با چرخاندن محکم کنید.



انتهای نرم سواب را در لوله قرار دهید.

سواب را با فشار دادن به کنار لوله در محل **خط علامت** بشکنید.

اگر نمونه خود را در کلینیک جمع آوری نمی کنید:

- مطمئن شوید که روی لوله ی آزمایش، نام و تاریخ تولد شما نوشته شده باشد.
- در کیسه پلاستیکی خطر زیستی را با گذاشتن نمونه در داخل آن ببندید و فرم آزمایشگاهی کاغذی خود را در جیب بیرونی آن بگذارید.

اگر مایع داخل لوله بیرون ریخت، لوله جدید تقاضا کنید.

نگران هستید که این کار را درست انجام نمی دهید؟

تحقیقات نشان می دهد که جمع آوری نمونه سواب شما توسط خودتان به همان اندازه نتیجه بخش است که توسط یک ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی انجام شود.

